

# POWER 2

**O FIM DA CELULITE CHEGOU**



**Inovadora multiplataforma  
com 4 tecnologias  
para tratamentos corporais  
e faciais completos**

 Eunsung





## Tratamentos eficazes e não invasivos

O Power2 vem com um novo conceito no tratamento do contorno corporal e também facial. Oferece múltiplas aplicações de tratamentos, especialmente na redução da celulite.


O Power2 é um sistema que emprega 4 tecnologias que, atuando em sinergia, promovem excelentes resultados:




Radiofrequência



Aplicador com rolo (endermologia)

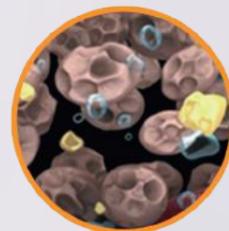

LED (luz de 658nm)

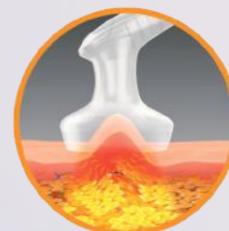

Vácuo

## Com os seus 5 aplicadores, o Power2 trata as seguintes indicações clínicas:

- ✓ Redução de celulite;
- ✓ Tratamento de flacidez da pele – Estímulo de colágeno e contração da pele;
- ✓ Redução da gordura localizada;
- ✓ Redução de medidas;
- ✓ Aperfeiçoamento dos contornos corporais e faciais.




# Tecnologias Power2



## Aplicador Endermológico

Composição inovadora de tecnologias consagradas. Este aplicador emprega rolo mecânico e vácuo para o tratamento endermológico consagrado por anos. A associação da RF e o LED (luz de 658nm) torna este aplicador o mais eficaz no mercado para o tratamento da celulite.

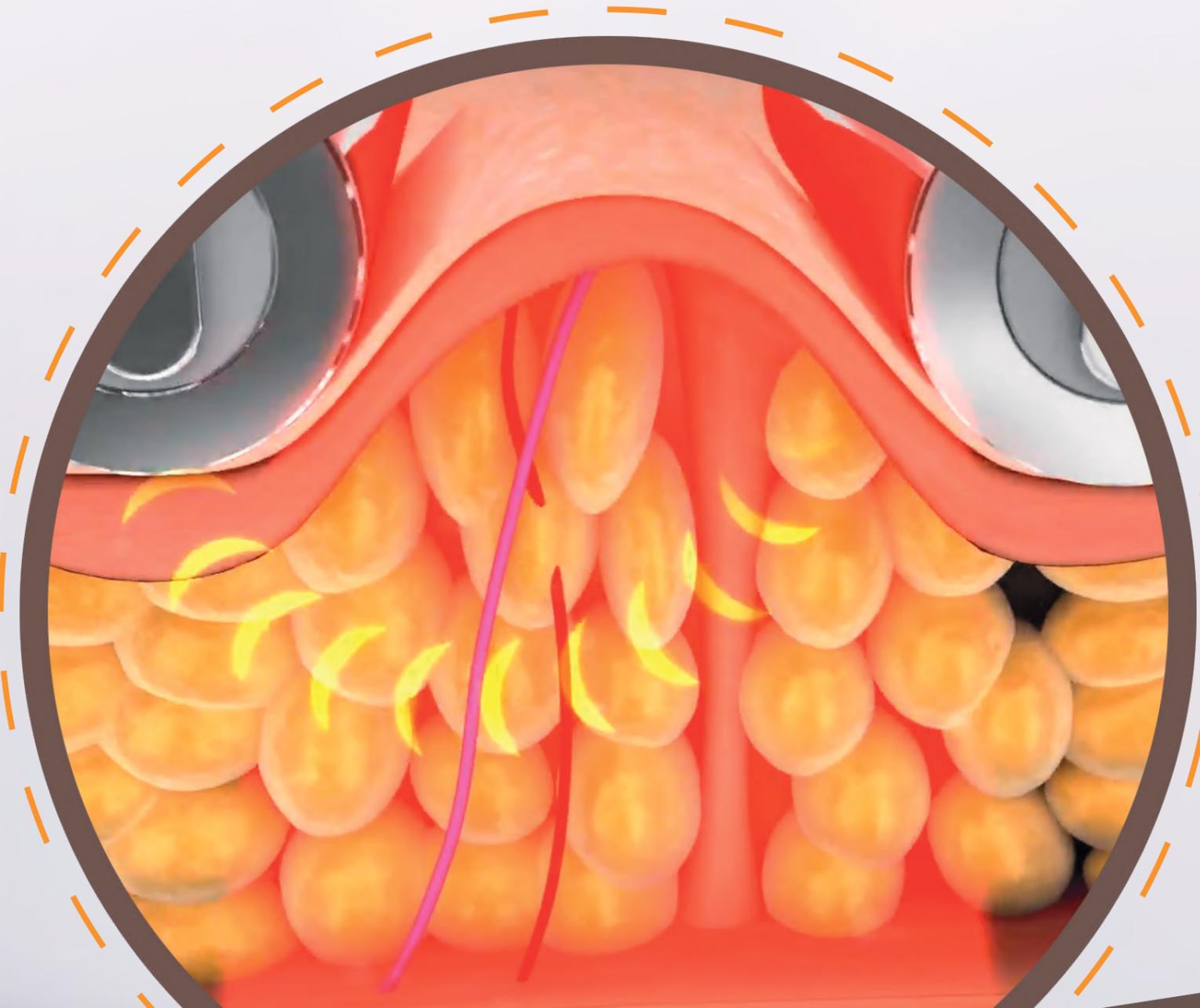

### O mecanismo de ação

O vácuo suga e, associado aos rolos, aumenta a circulação acelerando o metabolismo. A RF esquenta a região esvaziando os nódulos de gordura, em conjunto com o LED, e estimulando a produção natural de colágeno. Empregando estas tecnologias temos uma redução significativa da celulite.

O rolo é motorizado para facilitar o tratamento e com controle de movimento que pode ser invertido através de botões e, com esta característica, facilita a aplicação e o tratamento.

O equipamento tem 4 tipos de pulsos dinâmicos de vácuo adaptados para diversas condições de tratamento.

Eficaz também para tratamentos de redução de medidas corporais.

# Tecnologias Power2


## Radiofrequência de 2MHz

O Power2 emprega um sinal de RF de corrente alternada de 2 MHz com aplicadores multipolares e térmicos.

Conforme a energia de radiofrequência (RF) encontra a impedância no tecido, o calor é gerado. Como a derme, rica em colágeno, é aquecida acima de 60°C, ela desnatura imediatamente e as fibras se contraem. Na sequência ocorre uma cascata inflamatória em resposta ao calor inicial, resultando na formação de novas fibras de colágeno e elastina deixando a pele com uma aparência mais firme, mais contraída e mais jovem.



# Tecnologias Power2

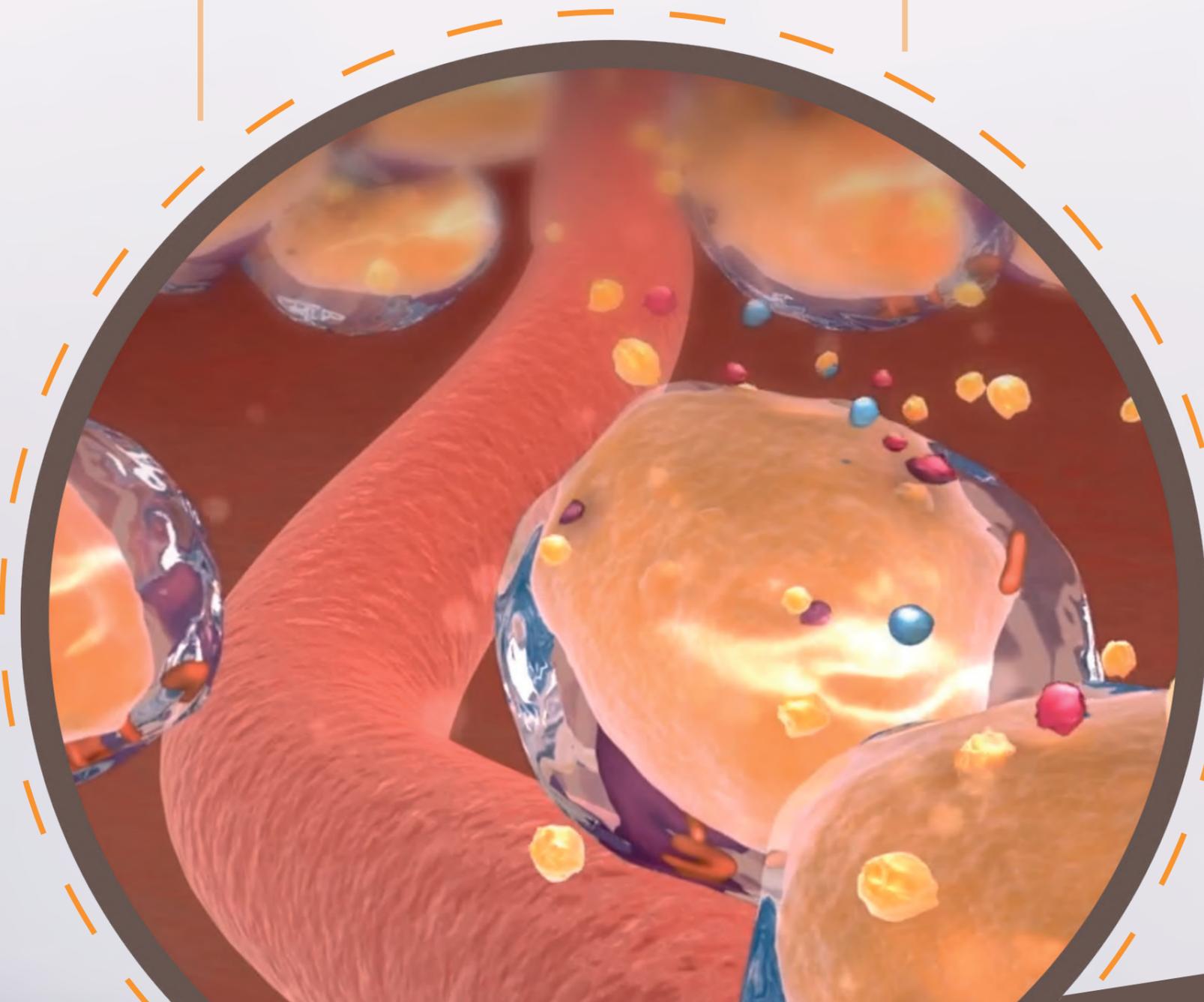

## LED (luz de 658nm)

O Power2 emprega LED (luz de 658nm).

À medida que a luz se irradia para o tecido adiposo, a fotoexcitação da citocromo-c-oxidase dentro do adipócito hipertrófico causa  $\text{Ca}^{+}$  e  $\text{H}^{+}$ . Isso ajuda a criar poros transitórios dentro do adipócito produzindo uma aceleração para separar os triglicerídeos em pedaços. O lipídio quebrado é facilmente liberado no espaço intersticial e processado pelas vias fisiológicas e metabólicas naturais do corpo.


É eficaz na redução das medidas gerais de circunferência corporal de regiões tratadas especificamente e também demonstrou reduzir o edema.

# Tecnologias Power2

## Tecnologia Vácuo

Power2 se orgulha de sua tecnologia assistida por vácuo associada a vários pulsos dinâmicos.

O vácuo levanta, dobra e comprime a pele para aumentar a circulação sanguínea local e estimular a drenagem linfática. A tecnologia facilita a atividade dos fibroblastos e promove vasodilatação difundindo o oxigênio, além de permitir a entrega precisa de energia. Ele apresenta 4 tipos de pulsos dinâmicos.

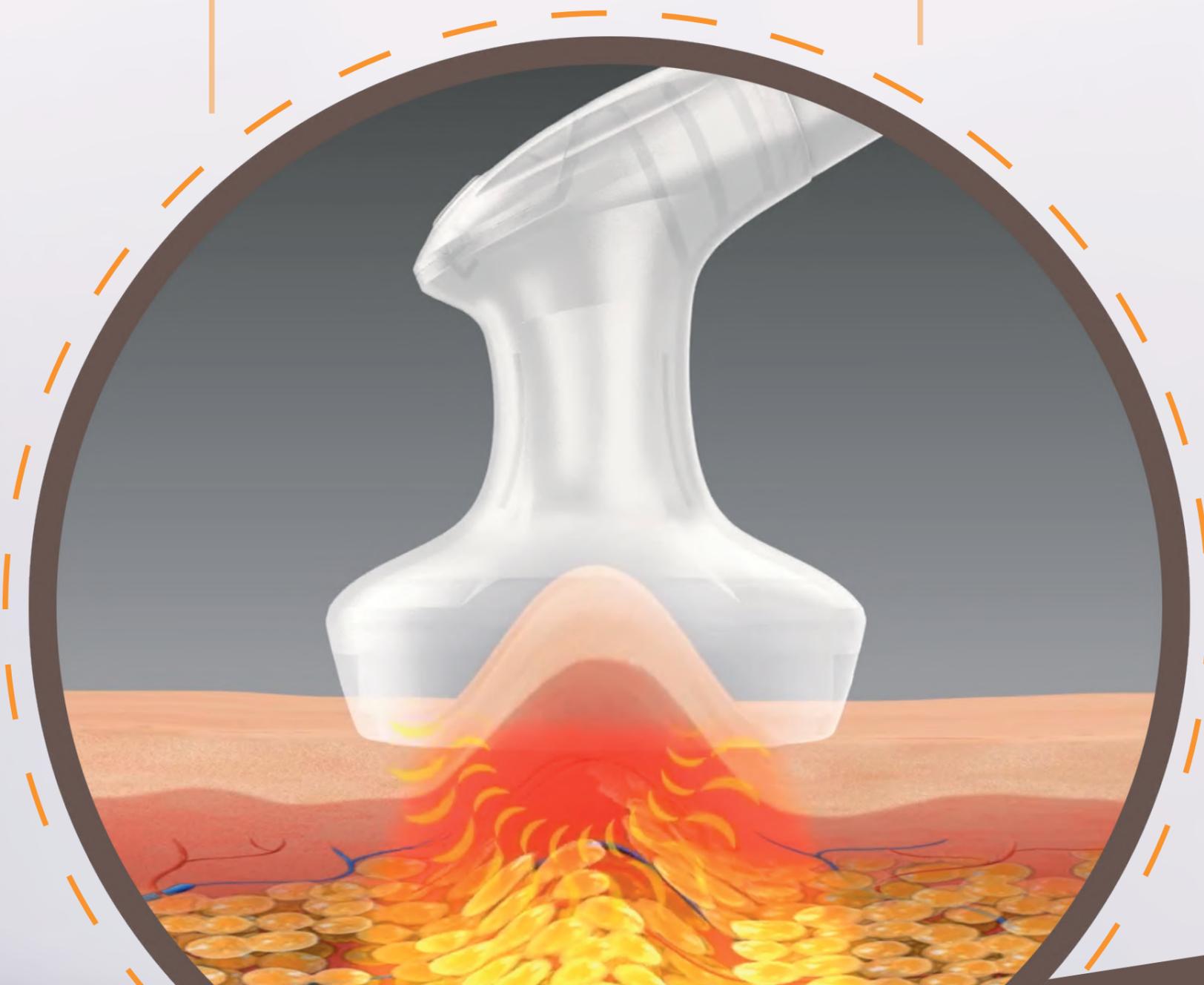

# Aplicadores Power2





# Vantagens

## **RF + Vácuo + LED (luz de 658nm)**

Integração de tecnologias para cuidados com o corpo.

## **Múltiplas ponteiros**

Possibilidade de aplicação em face e corpo. Atuando com máxima eficiência.

## **Ponteira Roll automatizada (Endermologia)**

Operação rápida em grandes áreas. Redução da celulite e melhora do contorno corporal.

## **Touch Screen**

Interface de usuário amigável e tela de toque, fornecendo conveniência na operação.

## **Seguro e higiênico**

Instalação para óleo residual dentro da máquina, permite a limpeza fácil quando o óleo usado é acumulado no filtro. Higiene aprimorada com filtro descartável para ponteira.

## **Protocolos Efetivos**

Protocolo detalhado para cada ponteira e área de tratamento para maximizar os resultados de seus tratamentos.

## **Sem consumíveis**



ANVISA - POWER2 Nº 80336749001

**LBT Lasers**

Rua Itajobi, 54 - Pacaembu  
São Paulo/SP  
Tel.:(11) 3873-1944  
Cel.:(11) 97141-6687  
[www.lbtlasers.com.br](http://www.lbtlasers.com.br)



LBTlasers



LBTlasers



LBTlasersBrasil

 **Eunsung**

